

機械器具 54 医療用捲綿子  
一般医療機器 眼アプリケータ 10175000

## BVI 眼科用吸水スポンジ WECK-CEL

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- \*・再滅菌禁止


#### 【形状・構造及び原理等】

細い棒(柄)の片端に三角状のスポンジ（本体）が取り付けられている。また、柄が付いていない本体だけのものもある。


##### 〈形状〉

形状の異なる3種類がある。

##### タイプ A

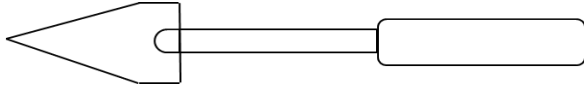

##### タイプ B

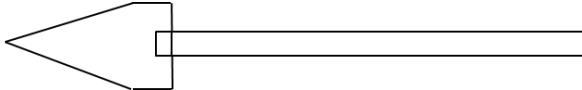

タイプ C：三角状のスポンジ（本体）だけ

- \* スポンジ：ポリビニルアルコール、綿、セルロース

#### 【使用目的又は効果】

眼科手術・処置時、排出物及び薬液等を吸収・除去し、視認性を確保する。

#### 【使用方法等】

柄を持ち、吸水スポンジの先端を適用箇所当てて吸収する。

#### 【使用上の注意】

##### 〈重要な基本的注意〉

- ・使用前に先端部分に埃、異物等が付着していないことを確認すること。
- \*・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 〈貯蔵・保管方法〉

高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。

##### 〈有効期間〉

- \* 5年（自己認証による。）

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

\*\* Tel：0120-991-092

\*\* 外国製造業者：

メドソープ ドミニカナ、エス、エイ、

(Medsorb Dominicana, S.A.)

国名：ドミニカ共和国