

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 単回使用持針器 12726020

Malosa シングルユース 持針器

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
Tel：0120-991-092

外国製造業者：
Beaver-Visitec International Limited
国名：英国

【形状・構造及び原理等】

1. 原理
本品はハンドルを持つ器具であり、ハンドル部に圧力を加えることで先端部が開閉し、縫合針を把持する。
2. 形状
先端部及びハンドル部には複数の形状がある。ハンドル部に樹脂のグリップが付属するタイプとしないタイプがある。

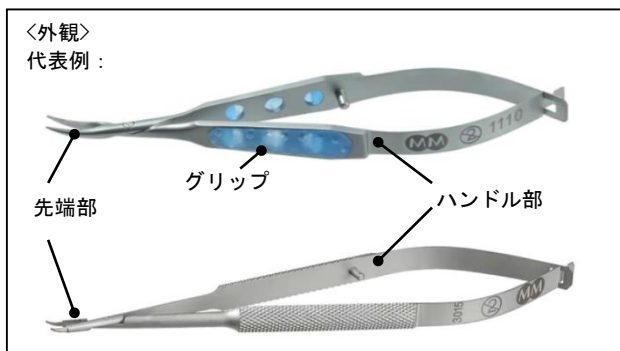

3. 主な材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

ハンドルを持つ器具で、遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状になっており、縫合時に縫合針を把持する。

【使用方法等】

1. 滅菌包装に破損等の異常がないこと確認し、本品が汚染されないよう滅菌包装を開封する。
2. 先端部分が周りに触れないように内部のトレーから取り出す。
3. ハンドル部を掴み、先端部で縫合針を把持する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

本品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・使用前に滅菌包装に記載されている有効期間を必ず確認し有効期間を過ぎた製品は使用しないこと。
- ・本品は1回限りの使用で必ず廃棄し、再滅菌・再使用はしないこと。また、未使用であっても一旦開封した製品は廃棄すること。
- ・使用後は感染防止に留意して廃棄すること。
- ・必要以上の力を加えないこと。〔製品が曲がったり、破損したりすることがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて、保管すること。

〈有効期間〉

包装に記載。〔自己認証（当社データ）による〕