

機械器具 35 医療用はさみ  
管理医療機器 単回使用眼科用せん刀 35327002

## VITREQ ディスポーザブル シザーズ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 概要

本品は、眼科手術時に組織を切断するために用いる眼科用手術器具であり、単回使用である。

| サイズ | 品名           |
|-----|--------------|
| 23G | 23G 垂直剪刀     |
|     | 23G マイクロ剪刀 直 |
|     | 23G マイクロ剪刀 曲 |
| 25G | 25G 垂直剪刀     |
|     | 25G マイクロ剪刀 直 |
|     | 25G マイクロ剪刀 曲 |
| 27G | 27G 垂直剪刀     |
|     | 27G マイクロ剪刀 曲 |

##### 2. 外観



|   | 名称                |
|---|-------------------|
| ① | 先端部               |
| ② | シャフト              |
| ③ | ハンドル（サイズにより色が異なる） |

##### 先端部形状

| 垂直剪刀 | マイクロ剪刀 直 | マイクロ剪刀 曲 |
|------|----------|----------|
|      |          |          |

##### 3. 材質

先端部：ステンレス鋼

シャフト：ニッケル-コバルト-クロム-モリブデン合金

#### 【使用目的又は効果】

眼科手術時の組織の切断に用いる。

#### 【使用方法等】

- ・本品を無菌的に開封する。
- ・滅菌包装から本品の先端部が周りに触れないように取り出し、使用する。
- ・ハンドルの開閉操作により先端部を開閉させ、眼組織の切断を行う。

#### 【使用上の注意】

##### 〈重要な基本的注意〉

- ・本品の先端は、鋭利、微細な構造なため、直接触れないこと。

- ・金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。  
[本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- ・必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]
- ・眼内への挿入および取り出しは、先端部を閉じた状態で行うこと。

#### 〈相互作用〉

##### 併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- 1) 電気メスなどの電気手術器
- 2) 除細動器

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

##### 〈有効期間〉

包装に記載。[自己認証（当社データ）による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

Tel：0120-991-092

外国製造業者：

Vitreq B.V.

国名：オランダ王国