

機械器具 42 医療用剥離子  
 管理医療機器 単回使用眼科手術用スパーテル 32754002

## ビジテック シングルユース スパーテル

### 再使用禁止

**\*【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**


製造販売業者：  
 ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社  
 \*\* Tel：0120-991-092

**【形状・構造及び原理等】**

本品は、眼科手術において眼の表面への物質の塗布、眼組織の処置または眼の表面または周辺部位からの異物の除去等に用いる単回使用のスパーテルである。使用部位・目的に応じて、様々な先端形状がある。ハンドルは金属製とプラスチック製がある。

外国製造業者：  
 ビーバービジテック インターナショナル リミテッド  
 (Beaver-Visitec International Limited)  
 国名：英国

代表例：

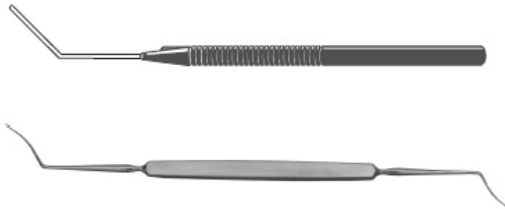

材質；先端部：ステンレススチール

**【使用目的又は効果】**

- \* 眼の表面への物質の塗布、眼組織の処置又は眼の表面又は周辺構造からの物質の除去等に用いること。

**【使用方法等】**

- \* 本品が汚染されないよう滅菌包装を開封する。先端部分が周りに触れないように内部のトレーから取り出し、使用する。

**【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- ・本品の先端は、鋭利、微細な構造なため、直接触れないこと。
- \* 金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。  
 [本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- \* 必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]

\* 〈相互作用〉

併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- 1) 電気メスなどの電気手術器
- 2) 除細動器

\* **【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

\* 〈有効期間〉

3年または5年（自己認証による。）

製品番号	有効期間
585063, 585022, 585069, 585141, 585062, 585181, 585038, 585077, 585233	5年
上記以外	3年