

機械器具 35 医療用はさみ  
 管理医療機器 単回使用眼科用せん刀 35327002  
 （単回使用はさみ 35325002）

## ビジテック シングルユース せん刀


### 再使用禁止

#### \*【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### \*【形状・構造及び原理等】

本品は、主として眼科手術において使用する単回使用のはさみである。組織の切断等に用いる。目的に応じて、様々な形状がある。本品は、切断部、ジョイント部、ハンドル部で構成される。

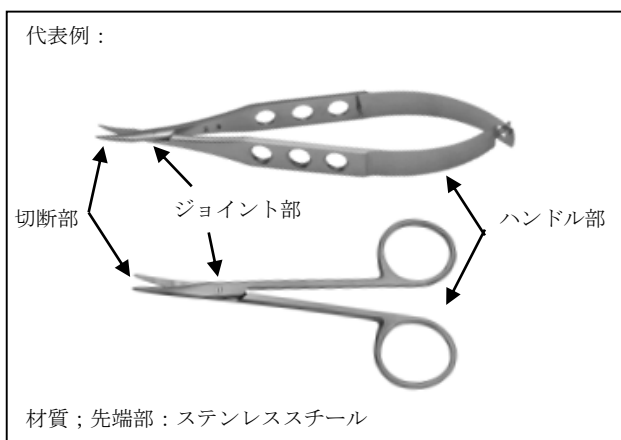

#### 【使用目的又は効果】

- \* 本品は、眼科手術の際、眼組織、消耗品、異物等の切断等のために用いること。又は医療用の単回使用はさみとして用いること。

#### 【使用方法等】

本品が汚染されないよう滅菌包装を開封する。先端部分が周りに触れないように内部のトレーから取り出し、使用する。

#### 【使用上の注意】

##### 〈重要な基本的注意〉

- \* 金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。  
 [本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。]
- \* 必要以上の力を加えないこと。[製品が曲がったり、破損したりすることがある。]

##### \* 〈相互作用〉

###### 併用注意

以下の製品との併用には注意すること。[絶縁体を傷つけたり、動作に障害を与えたりすることがある。]

- 1) 電気メスなどの電気手術器
- 2) 除細動器

##### \*【保管方法及び有効期間等】

###### 〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて、保管すること。

###### \* 〈有効期間〉

3年（自己認証による。）

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

\*\* Tel：0120-991-092

外国製造業者：

ビーバービジテック インターナショナル リミテッド

(Beaver-Visitec International Limited)

国名：英国