

機械器具 34 医療用刀  
管理医療機器 単回使用眼科用ナイフ 32764002

## ビジテック ブレード

### 再使用禁止

#### \*【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は主として眼科手術用の滅菌済みの刀である。刃の形状は、使用目的によっていくつかの種類に分かれる。

代表例：



材質；刃：ステンレススチール

#### 【使用目的又は効果】

眼科手術に使用すること。

#### 【使用方法等】

本品は滅菌済みであり、そのまま使用して手術時適切な切創を製作する。

#### 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- \* 金属アレルギーがある患者には慎重に使用すること。〔本品の材質は金属アレルギーを起こす可能性がある。〕
- ・滅菌包装の開封は使用直前に行うこと。また、全ての操作は無菌的に行うこと。
- ・本品の刃面は鋭利なため、取り扱いに注意すること。
- ・本品を投げたり、落下させたりしないこと。〔破損の原因となるおそれがある。〕
- ・本品を曲げたり、折損させたりしないこと。〔本品が損傷するおそれがある。〕
- ・本品使用時に必要以上の力を加えないこと。〔折損・曲がり等の原因となるおそれがある。〕
- ・使用前の本品を鉗子等の固いもので直接挟まないこと。〔本品が損傷するおそれがある。〕
- ・本品は1回限りの使用で必ず廃棄し、再滅菌・再使用はしないこと。また、未使用であっても一旦開封した製品は廃棄すること。
- ・使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

〈有効期間〉

- \* 外箱及び包装に記載（自己認証による。）

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

\*\* Tel : 0120-991-092

外国製造業者：

ビーバービジテック インターナショナル リミテッド

(Beaver-Visitec International Limited)

国名：英国