

Beaver Ring Cutter

ビーバー リングカッター

指がむくんで指輪が抜けないとき指輪を切断します



本体：円鋸歯1枚付 製品番号：374100

替歯 (通常歯)	替歯 (ハイスピード型)
 <p>製品番号：374150 色：銀色 材質：高炭素鋼 歯数：88個 (お買い上げ時に装着されています)</p>	 <p>製品番号：374151 色：黒色 材質：工具用炭素鋼 歯数：80個 (替歯としてご購入いただけます)</p>



切断可能な指輪

金、銀、プラチナ、チタニウムなどの金属 「硬度：およそ60ロックウェルC」まで

切断不可能な指輪

タングステン(電動カッターでなければ切れません)

他社の円鋸歯との比較顕微鏡写真



Beaverの高炭素歯




他社のステンレス製歯

Beaver Ring Cutterは米国製で、1960年代から50年余、世界各国の医療機関や救急隊で広く使用されています。この製品を製造販売するBeaver-Visitec Internationalは眼科治療用ディスポーザブル医療機器の開発製造及び販売会社です。日本国内にも子会社を設立して、薬事法の承認又は認証を受けた多くの眼科手術用ナイフ、カッター、注入針、焼灼器などを輸入販売しています。そのため、品質管理、販売後のアフターケアもメーカーとして直接責任をもって行う態勢を整えています。リングカッターの円鋸歯の材質は、眼科用ナイフとカッターの技術を存分に生かした、High Carbon Steel (高炭素鋼)を焼入れ加工することにより硬度を高めてあります。さらに工具用炭素鋼を使用したハイスピード型の高炭素鋼の高速歯も替歯として揃えています。宝飾店などで指輪を切る場合は、ステンレス製の円鋸歯のものが使用されていますが、救急現場には高炭素鋼の円鋸歯のご使用をお勧めします。

Beaver Ring Cutter

ビーバー リングカッター 取扱説明書

構成部品: ①ハンドル ②レバー ③レバー先端挿入部 ④レバー手元タブ ⑤ネジ ⑥円鋸歯 ⑦ワッシャー ⑧ハブ

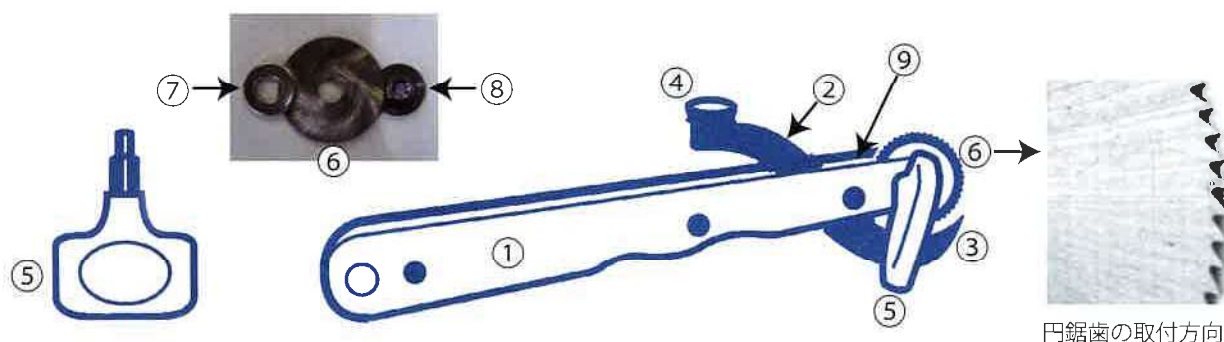

使用方法:

緊急時には迅速さと効率が必須になるため、事前にトレーニングを実施されることをお勧めします。

従来の比較的やわらかい金、銀、プラチナと違い、最近の指輪は硬い合金で作られています。

製品番号:374151ハイスピード型の特別頑丈な円鋸歯をご使用になると、より楽に切断することができます。

1. 指輪の下に③レバー先端挿入部(細くなった先端部)を滑り込ませる。
2. 親指で②レバー④手元タブを押す
3. ⑥円鋸歯が指輪にかみあうよう充分力を入れて押す。
4. ⑤ネジを指輪が切れるまで時計回りにまわす。たいていは数回まわすだけで簡単に指輪を外すことができます。
5. 細い指輪は一箇所カットするだけで外せます。
6. 太い指輪は、向かい合わせに二箇所カットすれば簡単に外せます。ビーバー円鋸歯の精密なカットにより二つに分かれた指輪の接着も簡単です。

替刃の取付方法:

1. ⑥円鋸歯を固定させるよう②レバー④手元タブを強く押す。
2. ⑤ネジを時計回りの反対方向にまわしてはずす。
3. 円鋸歯部、⑦-⑥-⑧をハンドル先端円鋸歯装着部分の⑨溝穴から抜く。
4. ⑦ワッシャーと⑧ハブを⑥円鋸歯からははずす。
5. 注意:⑦ワッシャーと⑧ハブを紛失しないようとっておく。(替刃に⑦ワッシャーと⑧ハブは付いていません。また別売もりしていません。)
6. 新しい⑥円鋸歯に⑦ワッシャーと⑧ハブを取り付ける。
7. ⑦ワッシャーと⑧ハブを取り付けた⑥円鋸歯を、⑦ワッシャーが⑤ネジ側になるようにし、⑥円鋸歯の中心がネジ穴とあうように⑨溝穴に挿入する。
*⑦ワッシャーがネジ穴側から見て⑥円鋸歯の手前側になるようにしてください。また円鋸歯の向きにも注意して取り付けてください。
8. ⑤ネジを差込み、⑥円鋸歯が時計回りに回転するまでしっかりねじ込む。

注意:

ビーバーリングカッターは他の機械部品と組み合わせるようには設計されていません。

規定外の装置と結合して使用すると取扱者と指輪をされている方に怪我を招く恐れがありますので、使用方法に従ってご使用ください。

製品番号	製品名	内容	個数	定価
374100	ビーバーリングカッター	本体+高炭素鋼円鋸歯 1枚付	1セット	¥16,500
374150	替歯(通常歯)	高炭素鋼円鋸歯	1枚	¥2,420
374151	替歯(ハイスピード型)	工具用炭素鋼円鋸歯	1枚	¥4,400

製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麴町2-8 MLC麴町ビル3階

www.bvimedical.com/jp

受注センター Tel. 03-5214-2337 Fax. 03-5214-2417

メール: ContactUs@bvimedical.com